

Probenentnahme aus der Mundschleimhaut für genetische Untersuchungen

Entnahme des Abstrichs nur mit diesem trockenen sterilen Abstrichtupfer.



Barcode aufkleben (falls vorhanden)
Name und Vorname angeben.

Anleitung:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Patient **ca. 30 Minuten** lang keine Nahrung aufgenommen, keinen Kaffee oder Tee getrunken und nicht geraucht hat.
2. Vor Entnahme den Mund 2x mit Wasser ausspülen.
3. Entnehmen Sie den sterilen Abstrichtupfer aus der Transportverpackung und reiben damit **30 Sekunden** an jeder Wangenseite unter gelegentlichem Drehen des Tupfers **kräftig** über die Wangenschleimhaut des Patienten.
4. Überführen Sie den Tupfer in die Transportverpackung.
5. Wiederholen Sie die Probenentnahme (Punkt 3 und 4) mit einem zweiten Abstrichtupfer und übersenden Sie die Proben umgehend an unser Labor.

Der Transport der Proben erfolgt zusammen mit dem ausgefüllten Auftragsformular und der genetischen Einverständniserklärung mit dem Fahrdienst oder auf dem Postweg.

Da der Test auf Nukleinsäure-Ebene durchgeführt wird, bedarf es während des Transportes keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Beachten Sie jedoch, dass, besonders bei heißer Witterung, ein Transport über mehrere Tage (z.B. ein Wochenende) vermieden werden sollte. Bewahren Sie gegebenenfalls die Probe im Kühlschrank auf, bis ein zügiger Transport gewährleistet ist.